

Infektionsdiagnostik

RightSign HBsAg Test

zum qualitativen Nachweis von HBsAg spezifischen Antikörpern
im Serum oder Plasma.

Die Hepatitis-B Infektion ist eine meldepflichtige, ansteckende Leberentzündung, die sowohl über das Blut als auch über andere Körperflüssigkeiten übertragen werden kann. Bei 1/3 der Fälle verläuft die Erkrankung symptomlos und bei 2/3 treten allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber und Druckschmerzen im rechten Oberbauch auf. In 10 % der Fälle entwickelt sie sich zu einer chronischen Hepatitis B-Form weiter, die zu einer Leberzirrhose oder sogar einem Leberkarzinom führen kann.



Ihre Vorteile im Überblick

- Qualitatives Ergebnis in **15 Minuten**
- Hohe Sensitivität (99,5 %) und Spezifität (99,6 %)
- Lagerung bei 2 bis 30 °C
- Lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten
- Komplettes Zubehör


RightSign HBsAg Test

schnell · einfach · sicher

Ein schneller immunochromatographischer qualitativer Test zum Nachweis von HBsAg-spezifischen Antikörpern im Serum oder Plasma.

Testdurchführung

1. Gekühltes Probenmaterial und Testkomponenten auf Raumtemperatur bringen.
2. Danach öffnen Sie den Folienbeutel durch Aufreißen an der Einkerbung.
Entnehmen Sie die Testkassette.
Legen Sie den Test auf eine saubere, ebene Fläche.
3. Beschriften Sie die Kassette mit Patientennamen oder ID-Nummer.
4. **Serum-/Plasmaprobe:**
Geben Sie 3 Tropfen (120 µl) der Probe mit der Pipette in den Probenschacht S.

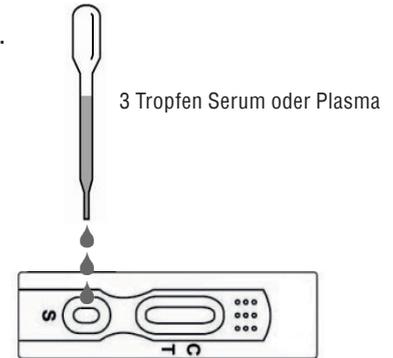

Lesen Sie das Testergebnis 15 Minuten nach Zugabe des Probenmaterials ab.
Nach 30 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr interpretierbar.

Ergebnisbewertung



Negativ

Erscheint nur eine farbige Linie in der Kontrollzone C und keine farbige Linie in der Testzone T, ist der Test negativ auf HBsAg Antikörper.



Positiv

Erscheinen zwei farbige Linien, eine in der Kontrollzone C und eine in der Testzone T, ist der Test positiv auf HBsAg Antikörper. Die Intensität der Testlinie T kann abhängig von der Antikörper Konzentration in der Probe variieren, aber jedes Anzeichen einer Linie sollte als positives Ergebnis betrachtet werden.



Ungültig

Erscheint keine farbige Linie in der Kontrollzone C, ist der Test in jedem Fall ungültig. Der Test sollte mit einer neuen Testkassette wiederholt werden.



Produkt	Art.-Nr.	Packungsmenge	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
RightSign HBsAg Test	0250003	25	Kassette	Serum/Plasma	15 Minuten	

Vertrieb durch:

möLab GmbH · Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 · 40764 Langenfeld
Telefon 02173 - 269900 · Fax 02173 - 2699029 · www.moelab.de · info@moelab.de

