



Gynäkologische Diagnostik

PROM Test

zum qualitativen Nachweis des IGFBP-1 im Vaginalsekret. Der Test dient zur Unterstützung der Diagnose auf einen vorzeitigen Sprung der Fruchtblase.

IGFBP-1 (insulin-like growth factor binding protein 1) kann im Vaginalsekret schwangerer Frauen nachgewiesen werden. Das Vorhandensein von IGFBP-1 prognostiziert ein erhöhtes Risiko einer Frühgeburt.



Ihre Vorteile im Überblick


- Qualitatives Ergebnis in **5 Minuten**
- Medizinisch-diagnostisch geeigneter cut-off (25 ng/ml)
- Hohe Sensitivität (98,1%) und Spezifität (98,0%)
- Lagerung bei Raumtemperatur (2 bis 30°C)
- Lange Haltbarkeit (bis zu 24 Monate)
- Komplettes Zubehör

PROM Test

Ein schneller immunchromatographischer Test zum qualitativen Nachweis von IGFBP-1 (insulin-like growth factor binding protein 1) im Vaginalsekret.

Testdurchführung

- Entnehmen Sie Vaginalsekret mit dem mitgelieferten, sterilen Abstrichtupfer vom hinteren Scheidengewölbe oder direkt vom Gebärmutterhals.
- Öffnen Sie das Probenröhrchen (grüner Schraubverschluss) und halten Sie es aufrecht.
- Geben Sie den Abstrichtupfer in das Röhrchen. Quirlen Sie ihn ca. 10-15 Sekunden in der Flüssigkeit. Drücken Sie die Flüssigkeit im Tupfer durch mehrmaliges Pressen und Drehen an der Röhrchenwand aus.
- Entsorgen Sie den Tupfer und schrauben Sie das Probenröhrchen zu.

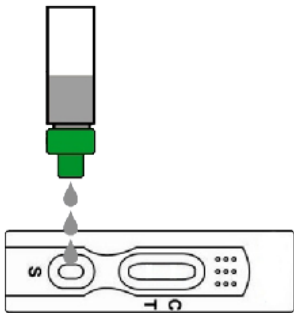

- Gekühltes Probenmaterial und Testkomponenten auf Raumtemperatur bringen.
- Öffnen Sie die Folie durch Aufreißen an der Einkerbung. Entnehmen Sie die Testkassette und die Pipette. Legen Sie den Test auf eine saubere, ebene Fläche.
- Beschriften Sie die Kassette mit Patientennamen oder ID-Nummer.
- Führen Sie den Test innerhalb 1 Stunde nach Entnahme aus der Folie durch.
- Schrauben Sie den transparenten Schraubverschluss des Probenröhrchens ab und geben Sie 3 Tropfen Probenmaterial (ca. 100 µl) in den Probenschaft (S).

**Lesen Sie das Testergebnis 5 Minuten nach Zugabe des Probenmaterials ab.
Nach 20 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr interpretierbar!**

Ergebnisbewertung



Negativ

Erscheint nur eine rote Linie im Kontrollbereich (C) und keine im Testbereich (T) ist der Test negativ.



Positiv

Es erscheinen zwei rote Linien, eine im Kontrollbereich (C) und eine im Testbereich (T). Die Intensität der Linie im Testbereich (T) kann, abhängig von der Konzentration des IGFBP-1 in der Probe, variieren.



Jedes Anzeichen einer Linie sollte als positives Ergebnis betrachtet werden. Die genaue Konzentration kann nicht angezeigt werden.



Ungültig

Erscheint keine Linie im Kontrollbereich (C) ist der Test in jedem Fall ungültig. Der Test sollte dann mit einer neuen Testkassette wiederholt werden.



Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie den Test nicht mehr und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Produkt	Art.-Nr.	Packungsmenge	Testform	Probenmaterial	Testdauer	PZN
PROM Test	0230106	20 Tests	Kassette	Abstrich	5 Minuten	13970415
PROM Test	0230106SP	10 Tests	Kassette	Abstrich	5 Minuten	13970409