

Infektionsdiagnostik

Influenza A&B Test

Zum qualitativen Nachweis von Nukleoprotein-Antigenen der Influenza Typ A & B in nasalen Tupferproben.

Die Influenza ist eine akute und hochansteckende Virusinfektion der Atemwege. Es gibt drei Typen der Influenzaviren: A, B und C. Typ-A-Viren werden mit meisten schweren Influenza-Epidemien in Verbindung gebracht.

Bei Typ-B-Viren verlaufen Infektionen im Allgemeinen milder. Typ-A- und Typ-B-Viren können gleichzeitig zirkulieren. Typ-C-Viren wurden bislang mit keiner großen Epidemie in Verbindung gebracht.

Die Krankheit ist durch Tröpfcheninfektion leicht übertragbar. Zumeist treten die Grippeausbrüche im Winter oder Frühjahr auf.

Durch die schnelle Diagnose einer Influenza-Infektion kann der Patient effektiv behandelt und die Krankheit somit eingedämmt werden.



Ihre Vorteile im Überblick


- Qualitatives Ergebnis in **10 Minuten**
- Nasalabstrich
- Typ-A- und Typ-B-Viren werden erkannt
- Hohe Genauigkeit, Sensitivität und Spezifität
- Lagerung bei 2° bis 30 °C
- Lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten
- Komplettes Zubehör inkl. Positiv- und Negativkontrolle

Influenza A&B Test

Ein schneller immunchromatographischer Test zum qualitativen Nachweis von Nukleoprotein-Antigenen der Influenza Typ A & B in nasalen Tupferproben.

Testdurchführung

1. Stellen Sie das Extraktionsröhrchen in den Ständer und füllen Sie so viel Extraktionspuffer in das Röhrchen, bis die untere Markierung erreicht wird.
2. Entnehmen Sie mithilfe des Abstrichtupfers Sekret aus einem Nasenloch. (Ein Rachenabstrich oder eine Nasensekretabsaugung ist ebenfalls möglich.)
3. Führen Sie den Tupfer in das Extraktionsröhrchen. Drücken Sie dabei das Röhrchen mehrmals mit den Fingern zusammen, um die Probe des Tupfers mit der Reagenz zu vermischen. Entfernen Sie den Tupfer und stecken Sie den Tropfeinsatz fest auf das Extraktionsröhrchen.
4. Entnehmen Sie die Testkassette dem versiegelten Folienbeutel und legen Sie diese auf eine saubere und ebene Fläche.
5. Geben Sie 4 Tropfen Probenmaterial in den Probenschacht (S).

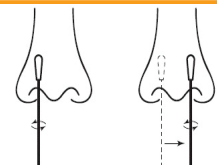

Lesen Sie das Testergebnis 10 Minuten nach Zugabe des Probenmaterials ab.
Nach 15 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr interpretierbar!

Ergebnisbewertung

Negativ



Im Kontrollbereich C erscheint eine farbige Linie.
In den Testbereichen A&B erscheint keine farbige Linie.

Positiv



Es erscheinen zwei oder drei farbige Linien, eine im Kontrollbereich C und mindestens eine in den Testbereichen A und/oder B.

Ungültig



Im Kontrollbereich C muss bei der Testdurchführung stets eine rote Linie erscheinen.
Beim Ausbleiben dieser Linie ist der Test in jedem Fall ungültig.
Bitte wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.

Produkt	Art.-Nr.	Packungsinhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
Influenza A&B Test	0230008	20 Tests	Kassette	Nasenabstrich	10 Minuten	17929645