

## Infektionsdiagnostik

# RightSign HBsAg Test

zum qualitativen Nachweis von HBsAg-spezifischen Antikörpern  
im Serum oder Plasma.

Die Hepatitis-B Infektion ist eine meldepflichtige, ansteckende Leberentzündung, die sowohl über das Blut als auch über andere Körperflüssigkeiten übertragen werden kann.

Bei 1/3 der Fälle verläuft die Erkrankung symptomlos.  
Bei 2/3 treten allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber und Druckschmerz im rechten Oberbauch auf.

In 10 % der Fälle entwickelt sie sich zu einer chronischen Hepatitis B-Form weiter, die zu einer Leberzirrhose oder sogar einem Leberkarzinom führen kann.



## Ihre Vorteile im Überblick


- Qualitatives Ergebnis in **15 Minuten**
- Hohe Sensitivität (99,8 %) und Spezifität (99,6 %)
- Lagerung bei 2 bis 30 °C
- Lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten
- Komplettes Zubehör

# RightSign HBsAg Test

Ein schneller immunochromatographischer Test zum qualitativen Nachweis von HBsAg-spezifischen Antikörpern im Serum oder Plasma.

## Testdurchführung

1. Gekühltes Probenmaterial und Testkomponenten auf Raumtemperatur bringen.
2. Danach öffnen Sie den Folienbeutel durch Aufreißen an der Einkerbung.  
Entnehmen Sie die Testkassette.  
Legen Sie den Test auf eine saubere, ebene Fläche.
3. Beschriften Sie die Kassette mit Patientenname oder ID-Nummer.
4. Geben Sie 3 Tropfen (ca. 120 µl) der Probe mit der Pipette in den Probenschacht S.

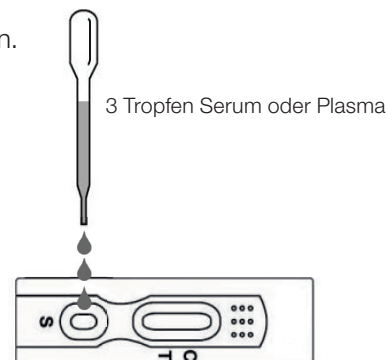

Lesen Sie das Testergebnis 15 Minuten nach Zugabe des Probenmaterials ab.  
Nach 30 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr interpretierbar.

## Ergebnisbewertung



### Negativ

Erscheint nur eine farbige Linie in der Kontrollzone C und keine farbige Linie in der Testzone T, ist der Test negativ auf HBsAg-Antikörper.



### Positiv

Erscheinen zwei farbige Linien, eine in der Kontrollzone C und eine in der Testzone T, ist der Test positiv auf HBsAg-Antikörper. Die Intensität der Testlinie T kann abhängig von der Antikörperkonzentration in der Probe variieren. Jedes Anzeichen einer Linie sollte als positives Ergebnis betrachtet werden.



### Ungültig

Erscheint keine farbige Linie in der Kontrollzone C, ist der Test in jedem Fall ungültig. Der Test sollte mit einer neuen Testkassette wiederholt werden.



Produkt	Art.-Nr.	Packungsinhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
RightSign HBsAg Test	0250003	25 Tests	Kassette	Serum/Plasma	15 Minuten	18783706

Vertrieb durch:

möLab GmbH · Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 · 40764 Langenfeld  
Telefon 02173 - 269900 · Fax 02173 - 2699029 · [www.moelab.de](http://www.moelab.de) · [info@moelab.de](mailto:info@moelab.de)

